


届出番号：09B2X10012000004
類別：医04 整形用品 家庭用磁気・熱療法治療器
一般医療機器 一般的名称：家庭用温熱パック JMDNコード71019000
販売名：オンスタイルd

【禁忌・禁止】（守らないと副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 再使用禁止。
- 次の人は使用しない。
 - ①糖尿病などで温感や血行に障がいのある人。
 - ②自分ではがすことができない人。[①②重度のやけどになることがある]
 - ③温まると湿疹などが出る人。
- 次の部位には使用しない。
 - ①首肩以外の部位、粘膜。 [①やけどになることがある]
 - ②傷口。
 - ③打撲、捻挫などで腫れや熱がある部位。
 - ④湿疹、かぶれなどのある部位。
 - ⑤薬などを塗った部位。 [②③④⑤悪化の恐れがある]


【形状、構造及び原理等】

1. 形状

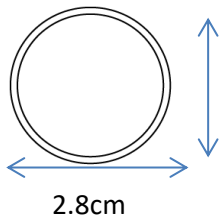

2. 原理

鉄粉の酸化反応による発熱

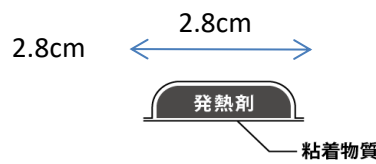

【使用目的又は効果】

使用目的：温熱療法

効果：温熱効果

1. 血行をよくする 2. 筋肉のコリをほぐす
3. 筋肉の疲れをとる 4. 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
5. 疲労回復 6. 胃腸の働きを活発にする

【使用方法等】



首や肩のコリを感じるポイントの汗や水分などをよくふき取る。
使用直前に袋から温熱パッチを取り出し、フィルムをはがして直接肌に貼る。
* 衣類などで覆われると熱くなりすぎる場合がある。
* アクセサリー類に触れないようにする。
* 使用環境や体調によって、効果の感じ方に差異が生じる。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

- ①就寝時や寝具の中などで使用しない。
- ②ストーブなどの暖房器具の近くで使用しない。
- ③強く押さえつける状態や、圧迫するような状態で使用しない。
(下着の肩ヒモやショルダーバッグのベルトなど)
- ④すぐはがせない状態で使用しない。
- ⑤運動時は使用しない。
- ⑥貼付した肌の状態を確認できない状況で使用しない。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の方は慎重に使用すること)
皮フの弱い方[やけどになりやすい]、
高齢者[生理機能が低下していることが多く、やけどすることがある]
2. 重要な基本的注意
 - 1) 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談する
医師の治療を受けている方。妊娠中の方。
薬や化粧品などでアレルギー症状（発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等）を
起こしたことのある方。
 - 2) 発疹・発赤・かゆみ・かぶれ・刺激感・痛み・
皮フはく離などの症状が治まらない場合は直ちに使用を中止し、
本品を持って医師または薬剤師に相談する。

3) 使用中の注意

- ①熱いと感じたり、異常を認められる場合はすぐにはがす。
- ②温熱効果により肌が赤くなったり、かゆみを感じることもある。
時々肌の状態を確認し、20分を超えて使用しない。
- ③低温やけど予防のための注意
低温やけどとは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると
起こるやけどのこと。気がつかないうちに起きる場合があるので、
時々肌の状態を確認する。
- ④同じ部位へ使用する場合は、肌の状態を確認し、異常がある場合は使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法：直射日光を避け、涼しい所に保管する。
幼児の手の届くところに置かない。
- 有効期間：側面に記載

【取扱い上の注意】

- 本品をはがす時はゆっくりはがす。
(貼り直すと粘着力は低下する。)
- 入浴時は必ずはがす。
- 本品を無理に押したり、内容物を取り出さない。
- 内容物が肌に直接触れた場合は、ぬれたタオル等でふき取るか洗い流す。
- 本品を洗濯したり水にぬらさない。
内容物のサジで汚れる場合あり。
- 発熱が終わったらすぐに捨てる。
- 本品は食べられない。
誤って口にしたら場合は、すぐに医師に相談する。
- 使用後は市町村の区分に従って捨てる。
- 有効期間内に使用する。
- 用途以外に使用しない。

【製造販売業者の名称等】

名称：エステマイコール株式会社
郵便番号：328-0135
住所：栃木県栃木市千塚町1717番地
電話：0282-31-2500

販売業者の連絡先

名称：エステ株式会社
住所：東京都新宿区下落合1-4-10
問い合わせ先：0120-145-230